

Ich mach den Test!



1



Putz die Nase. Wasch die Hände.

2



Reiß die Silberfolie auf. Hol die Testkassette raus und leg sie vor dich hin.

3



Benutz Halter oder Lasche.

Mach die rote Kappe vom Röhrchen ab. Stell das Röhrchen offen in den Halter oder in eins der Löcher in der Lasche der Verpackung.

4



Puschel

Pack das Teststäbchen aus. Öffne die Folie an der Seite mit dem blauen Dreieck. Fass es nur unterhalb des Puschels an.

5



Jetzt wird's kitzelig! Roll das Stäbchen 5-mal durch das eine Nasenloch. Roll dann 5-mal auch durch das andere Nasenloch.

rechts 5x links 5x vorderer Nasenbereich

6



Tauch den Puschel ins Röhrchen. Rühr 30 Sekunden um - gründlich und vorsichtig.



30sek.

7

Drück das Röhrchen wo die Riffel sind fest zusammen. Quetsche den Puschel beim Rausziehen mehrmals aus.



8

Halt das Röhrchen gut fest und setz den Deckel drauf.




9

Gib vorsichtig genau 3 Tropfen in die kleine S-Öffnung der Testkassette - und jetzt Finger weg!



Warte 15 Minuten

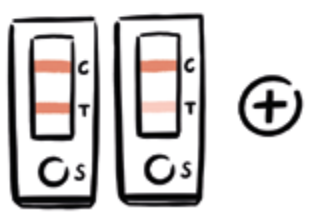

2 Striche: Corona positiv



1 Strich: Corona negativ



Ohne Strich bei "C" ist der Test ungültig

Was heißt C und T? C=Control (Das ist Englisch und bedeutet Kontrolle.), T=Test

DU BIST
DRACHENSTARK!



Mal mich aus!